



Ausgabe: 12/2020

# Gebrauchsanleitung / Wichtige Hinweise

Made in Germany/Saxony

## Nora F FFP2

### Wofür ist die Maske zu verwenden?

- Die Maske ist für den Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis geeignet.
- Die Gesamtleckage der Maske liegt unter 8 % und 94 % der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert (gemäß EN 149).

### Wofür ist die Maske nicht zu verwenden?

- Das Tragen der Maske schützt nicht vor Gasen und fehlendem Sauerstoff.
- Die Maske ist nicht zu verwenden, wenn eine Konzentration gefährlicher Substanzen unbekannt ist oder das Leben bedroht.
- Die Maske schützt nicht gegen krebserregende Stoffe, radioaktive Partikel oder biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3.

### Wann darf die Maske nicht verwendet werden?

- Wenn die Maske oder die Verpackung beschädigt ist.
- Wenn das Verfallsdatum vorüber ist. (siehe Verpackung)
- Kennzeichnung „NR“: Maske ist nicht wiederverwendbar. Nach einmaliger Verwendung (z. B. nach einer Schicht) ist die Maske zu entsorgen.

### Zusätzliche Informationen

- Gebrauchte Masken sollen entsprechend der lokalen Gesetzgebung entsorgt werden.
- Die Masken sind vom Umtausch ausgeschlossen.

### Wie muss die Maske transportiert und gelagert werden?

- Die Maske sollte in einem Temperaturbereich von -20 bis 50 °C und bei einer maximalen relativen Luftfeuchte von 80 % transportiert und gelagert werden.
- Die Maske sollte in der Originalverpackung und fern von Sonneneinstrahlung bis zur Verwendung transportiert und gelagert werden.
- Während des Transportes und der Lagerung ist darauf zu achten, dass die Maske und die Verpackung nicht beschädigt werden.

### Was ist beim Verwenden zu beachten?

- Der Träger soll gut über die Verwendung informiert werden.
- Wenn die Maske nicht ordnungsgemäß verwendet wird (z. B. Maske sitzt nicht richtig), kann die Wirksamkeit der Maske beeinträchtigt werden.
- Wenn sich Gesichtshaare unter der Dichtlinie am Gesicht befinden, ist die Dichtheit der Maske möglicherweise nicht mehr gewährleistet.
- Die Maske darf nur in ausreichend mit Sauerstoff belüfteten Räumen verwendet werden (> 19 %).
- Verlassen Sie sofort den Bereich/Raum, falls Sie Schwierigkeiten beim Atmen, Schwindelgefühl oder andere Beschwerden verspüren.
- Die Maske darf nicht in explosionsfähiger Atmosphäre verwendet werden.